

	ГБУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер		РИ -014
	<i>Порядок снятия костюма противочумного «КВАРЦ-1М» для работы с возбудителями первой группы патогенности (чума, натуральная оспа, болезнь Марбурга, Эбола и т.п.) в очагах инфекционных заболеваний</i>		Копия №
Страница 1 из 3	Редакция: 1	В силе от: 2018-07-26	Утвердил: Главный врач Р.З. Султанов

1. ПОЛИТИКА

Комплект «Кварц-1М» снимают после работы в специально выделенном для этого помещении или в той же комнате, в которой проводились работы, после полного её обеззараживания.

В помещении должны быть в наличии:

- дезсредства, в инструкции которых предусмотрено применение их при заболеваниях, приводящих к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санэпидблагополучия. Концентрация рабочих растворов дезсредств готовится для использования в соответствии с режимом обеззараживания спор сибирской язвы;
- ёмкость для приготовления рабочего раствора дезинфицирующего средства с этикеткой для внесения информации о дезсредстве;
- ёмкость с рабочим раствором дезсредства;
- ёмкость с маркировкой «для обеззараживания комплекта «Кварц-1М» (для комбинезона, полотенца, шлема - маски, бахил) с этикеткой для внесения информации о дезсредстве;
- ёмкость с маркировкой «для дезинфекции рук в перчатках» с этикеткой для внесения информации о дезсредстве;
- ёмкость с маркировкой «для дезинфекции перчаток» с перфорированным пакетом-вкладышем красного цвета с этикеткой для внесения информации о дезсредстве;
- пакет красного цвета для сбора медицинских отходов класса В;
- транспортировочный контейнер, для доставки медицинских отходов класса В на утилизатор «Термодез»;
- мешок из клеенчатого материала с завязкой для доставки бикса в баклабораторию для обеззараживания паровым методом;
- коробка стерилизационная (бикс);
- салфетки антисептические спиртовые для обеззараживания фонендоскопа, не менее 5 штук.

Комплект снимают только самостоятельно, очень медленно, осторожно, по возможности перед зеркалом.

2. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ДЕЙСТВИЙ (ПРОЦЕССА)

Шаг	Действие	Ответственный
1	Тщательно, в течение 1-2 минут, вымыть руки в перчатках в ёмкости с маркировкой «для дезинфекции рук в перчатках».	Врач, медицинская сестра
В дальнейшем руки обрабатывают в растворе после каждой манипуляции и высушивают полотенцем.		
2	Снять крышки со всех ёмкостей с рабочими растворами дезсредств;	Врач, медицинская сестра
3	Открыть стерилизационную коробку (бикс) для специального фильтра ФСУ-МБ;	Врач, медицинская сестра
4	Снять верхние перчатки, погрузить их в ёмкость с маркировкой «для дезинфекции перчаток»;	Врач, медицинская сестра
5	Развязать завязки на бахилах, снять бахилы, погрузить их в ёмкость с маркировкой «для обеззараживания комплекта «Кварц-1М»;	Врач, медицинская сестра

6	Расстегнуть текстильную застежку на комбинезоне;	Врач, медицинская сестра
7	Поднять рукава комбинезона;	Врач, медицинская сестра
8	Снять перчатки с подрукавников комбинезона;	Врач, медицинская сестра
9	Снять рукава комбинезона, брюки (выворачивая наружной поверхностью вовнутрь);	Врач, медицинская сестра
10	Погрузить комбинезон в ёмкость с маркировкой «для обеззараживания комплекта «Кварц-1М»;	Врач, медицинская сестра
11	Развязать стягивающую ленту по горловине, снять защитную пелерину шлема;	Врач, медицинская сестра
12	Снять полумаску, оттягивая двумя руками вперед, вверх и назад;	Врач, медицинская сестра
13	Отвернуть фильтр от шлема-маски;	Врач, медицинская сестра
14	Погрузить полумаску в ёмкость с маркировкой «для обеззараживания комплекта «Кварц-1М»;	Врач, медицинская сестра
15	Поместить фильтр в бикс, закрыть бикс;	Врач, медицинская сестра
16	Поместить бикс в мешок из клеенчатого материала, завязать завязку;	Врач, медицинская сестра
17	Снять перчатки, проверить их целостность в ёмкости с маркировкой «для дезинфекции рук в перчатках»;	Врач, медицинская сестра
18	Погрузить перчатки в ёмкость с перфорированным пакетом красного цвета с маркировкой «для обеззараживания печаток»;	Врач, медицинская сестра
19	Провести гигиеническую обработку рук с использованием антибактериального жидкого мыла.	Врач, медицинская сестра
20	Высушить руки, используя одноразовые бумажные полотенца;	Врач, медицинская сестра
21	Использованные бумажные полотенца поместить в пакет красного цвета для сбора медицинских отходов класса В.	Врач, медицинская сестра

Если комбинезон или защитная оболочка шлема во время работы намokли, то необходимо, не снимая перчаток, обработать ветошью, обильно смоченной в дезинфицирующем растворе одежду и кожу в тех местах, где они намokли.

Дезинфекция комбинезона Кварц

1	Замочить комплект «Кварц-1М» в промаркированной ёмкости с дезинфицирующим средством, выдержать время экспозиции, внести информацию на этикетку о дате, времени обеззараживания, поставить подпись;	Врач, медицинская сестра
2	Выстирать Комплект с применением поверхностно - активных веществ («Лотос» и др.). Шлем выстирать ручным способом;	Сестра-хозяйка подразделения
3	Высушить изделие.	Сестра-хозяйка подразделения

Дезинфекция использованных перчаток

1	Погрузить перчатки в ёмкость с перфорированным пакетом-вкладышем красного цвета с маркировкой «для дезинфекции перчаток». Выдержать время экспозиции, внести информацию на этикетку емкости о дате и времени обеззараживания перчаток, поставить подпись;	Врач, медицинская сестра
---	---	--------------------------

	Страница 3 из 3	Редакция: 1	В силе от: 2018-07-26	РИ -014
---	-----------------	-------------	-----------------------	---------

2	Взять второй пакет-вкладыш красного цвета для дезинфекции отходов класса В. Оформить этикетку на пакете, указав: наименование медицинской организации, отделение, дата сбора отходов класса В, поставить подпись лица, ответственного за сбор отходов. Поместить пакет в транспортировочный контейнер. Достать перфорированный пакет-вкладыш с перчатками из ёмкости по окончании экспозиции, дать стечь дезраствору;	Врач, медицинская сестра
	Поместить перфорированный пакет с использованными перчатками во второй пакет красного цвета;	Врач, медицинская сестра
3	Доставить транспортировочный контейнер на утилизатор «Термодез».	Сестра-хозяйка, санитарка подразделения
	Провести дезинфекцию транспортировочного контейнера, внести соответствующую информацию в этикетку, закрепленную к контейнеру.	Сестра-хозяйка, санитарка подразделения
Деконтаминация фильтра		
1	Осуществлять деконтаминацию фильтра с клеенчатым мешком в баклаборатории методом автоклавирования в биксе при давлении две атмосферы в течение 1,5 часов;	Сотрудники баклаборатории
2	Надеть одноразовый защитный комплект спецодежды (маска медицинская, шапочка медицинская, халат медицинский хирургический, перчатки медицинские стерильные, очки защитные, бахилы) перед получением бикса с использованным фильтром;	Сотрудники баклаборатории
3	Развязать клеенчатый мешок, соблюдая требования работы с возбудителями 1-4 групп патогенности, переместить бикс и клеенчатый мешок в автоклав для проведения обеззараживания;	Сотрудники баклаборатории
	Произвести обеззараживание.	Сотрудники баклаборатории

Гарантийный срок эксплуатации фильтра - 10 циклов автоклавирования.

Гарантийный срок хранения фильтра -5 лет со дня изготовления.

Срок продолжительности пребывания в костюме защитном противочумном «КВАРЦ-1М» до 3-х часов.

Использованная литература:

«Памятка по обращению с комплектом «КВАРЦ – 1 М».